

SPOSÓB UŻYCIA

OPATRUNKI PRZECIWBAKTERYJNE WOKÓŁ CEWNIKA SILVERLON® LIFESAVER

Instrukcja przeznaczona jest wyłącznie do celów szkoleniowych. Pełne instrukcje oraz wskazania do stosowania znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Przed nałożeniem opatrunku należy oczyścić miejsce wprowadzenia cewnika zgodnie ze standardową procedurą.



Przygotować skórę wokół rany zgodnie z procedurą obowiązującą w szpitalu. Przed zastosowaniem opatrunku Silverlon® Lifesaver cewnik pacjenta powinien zostać założony zgodnie z zasadami najlepszych praktyk obowiązującymi w danej placówce.



1

Wyjąć opatrunek z opakowania stosując technikę aseptyczną, a następnie ułożyć go płasko, srebrną stroną do góry.



2

Odśloniętą stronę zwilżyć sterylną wodą lub roztworem soli fizjologicznej



3

Delikatnie ułożyć opatrunek wokół cewnika. Biała strona opatrunku powinna być skierowana do góry, natomiast srebrna strona powinna przylegać do skóry pacjenta.



4

Wyśrodkować wewnętrzny otwór opatrunku wokół cewnika, układając go w taki sposób, by nacięcie na opatrunku znajdowało się w jednej linii z cewnikiem.



5

Przymocować opatrunek cewnika w punkcie wprowadzenia cewnika do ciała pacjenta przy pomocy dowolnego sterylnego przezroczystego opatrunku osłonowego.

REF/Nr kat.

IVCD-15

IVCD-40

Rozmiar:

Ø2,5 cm z otworem Ø1,5 mm

Ø2,5 cm z otworem Ø4,0 mm

REF/Nr kat.

IVCD-70

Rozmiar:

Ø2,5 cm z otworem Ø7,0 mm

SILVERLON®

safe. strong. simple.

CE 2797

Wyroby Medyczne

Producent:



Argentum Medical

2571 Kaneville Ct. Geneva, IL 60134

www.silverlon.com

Argentum Medical and Silverlon®

are registered trademarks of Argentum Medical, LLC.

Dystrybutor:



KIKGEL Sp. z o.o.

ul. M. Curie-Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd

tel.: 44 719 23 40, e-mail: biuro@kikgel.com.pl

www.kikgel.com.pl

LC-SMM-20-04 Rev A